

令和3年4月13日

お客様各位

株式会社ディックスバイオテック

ポジティブコントロール使用における注意喚起

試薬キットに同梱されているポジティブコントロールの使用についてはコンタミネーションにご注意ください。

ポジティブコントロールは極めて高濃度の合成 DNA が含まれており、微飛沫であってもそれが機器等に付着した場合、コンタミネーションにより PCR 検査において原因不明の偽陽性が起きる可能性があります。

試薬チップへのポジティブコントロールや試料の充填において表面に漏出した試料についてはコンタミネーションが起きないように注意し、次亜塩素水を十分に噴霧するなど、残渣 DNA 対策を十分に行っていただきますようお願いいたします。

一旦機器の外装や安全キャビネットに付着したポジティブコントロール等は長期にわたり PCR 検査を攪乱する恐れがあるため、次亜塩素酸水を用いたこまめな清掃が必要です。